

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
SCHODOLEZ YHR-LD01



Důrazně doporučujeme, aby zařízení obsluhoval pouze certifikovaný a proškolený personál.
Neškolená obsluha může způsobit zranění nebo poškození zařízení.

1. Stručný úvod

Schodolez splňuje normy CE a ISO.

Je napájen lithium-iontovou baterií a poháněn elektromotorem.

Umožňuje snadnou přepravu osob se sníženou pohyblivostí nahoru i dolů po schodech.

2. Technické specifikace

Výška teleskopického madla: 108 cm / 127 cm / 146 cm / 164 cm

Rozměry zařízení: 108 × 52 × 103 cm

Rozměry sedadla: 49 × 42,5 cm

Výška sedu: 50 cm

Délka předních teleskopických madel: 15 cm / 35 cm

Délka zadních nosných madel: 26 cm

Rozměry ve složeném stavu: 108 × 62 × 27 cm

Maximální nosnost: 200 kg

Úhel pásů: 20°

Čistá hmotnost: 34 kg

Nabíječka: 29,4 V / 2 A

Hmotnost nabíječky: 0,4 kg

Napájení: AC 100–240 V / 50–60 Hz

Motor: DC 24 V / 200 W

Baterie: 24 V / 13,2 Ah

Rozměry balení: 116 × 68 × 30 cm

Hrubá hmotnost: 46 kg

3. Součásti zařízení

1. Ovládací panel
2. Teleskopické horní madlo
3. Nastavitelná a odnímatelná opěrka hlavy
4. Bezpečnostní pás vestového typu
5. Přední madla / opěrky rukou
6. Sedák s měkkým polstrováním
7. Ovládací tyč skládání
8. Brzda zadních kol
9. Tlačítko předního madla
10. Přední teleskopické madlo
11. Přední otočné kolečko
12. Sklopná opěrka nohou
13. Baterie
14. Zadní kola
15. Zadní nosné madlo
16. Zámek zadního madla
17. Červená páka zajištění horního madla
18. Pásový mechanismus
19. Napínák pásu
20. Horní tyč pro naklonění
21. Červená tyč pro vrácení pásu
22. Červený pedál pro otevření pásů
23. Spodní tyč pro naklonění
24. Kryt ochrany motoru
25. Klíč baterie



4. Nabíjení baterie

Před použitím musí být nabíječka zkontrolována dle místních předpisů.



Postup nabíjení:

1. Připojte DC konektor do nabíjecího portu baterie.
2. Druhý konec zapojte do síťové zásuvky.
3. Počkejte na úplné nabití baterie.

Kontrolka změní barvu z červené na zelenou – baterie je plně nabita.

Nabíječka se po nabití automaticky přepne do udržovacího režimu proti přebití.

Důležité:

- Pokud je kapacita baterie pod 25 %, je nutné nabíjení.
- Pro dosažení plné kapacity může být nutné několik cyklů nabití/vybití.
- Nabíječku nerozebírejte.
- Nevystavujte vlhkosti.
- Nedotýkejte se konektorů mokřýma rukama.
- Po nabití nejprve odpojte ze zásuvky, poté z baterie.
- Nabíjejte po každém použití nebo minimálně každé 2 týdny.

5. Instalace baterie

Zarovnejte drážku baterie s vodicí lištou.

Zasuňte baterii po směru šipky až do zacvaknutí.

Otočte klíčem o 180° doprava pro uzamčení.

Vyjmutí:

Otočte klíčem o 180° doleva a vysuňte baterii směrem ven.



6. Kontrola kapacity baterie

Stiskněte tlačítko uprostřed indikátoru.

4 LED kontrolky = 100 % (každá 25 %).

Pokud svítí pouze jedna kontrolka, zařízení nepoužívejte a nabijte baterii.



7. Zapnutí / vypnutí baterie

Zapnutí:

Zapněte bateriový spínač.

Stiskněte tlačítko POWER.

LED displej se rozsvítí.

Vypnutí:

Stiskněte POWER.

Vypněte bateriový spínač.

Baterie má dva klíče pro uzamčení k zařízení.



8. Příprava k použití

Rozložení

:



Otevřete konstrukci

Otevřete opěrky rukou

Otevřete zadní madla

Vysuňte přední teleskopická madla (stisk červeného tlačítka)

Uvolněte pásy sešlápnutím červeného pedálu

Při používání musí být teleskopické madlo nastaveno přibližně do výšky ramen obsluhy.



9. Nastavení teleskopického madla

Zvýšení:

Stiskněte červenou pojistku a vytáhněte madlo.

Snížení:

Stiskněte pojistku a spusťte madlo dolů.

10. Bezpečnost cestujícího

Nastavte opěrku hlavy dle výšky osoby.

Po usazení upevněte bezpečnostní pás

11. Skládání zařízení



Sklopte opěrky rukou

Zasuňte přední madla

Zajistěte pásy

Stiskněte podpěrnou konzoli a složte sedák

Sklopte madla

12. Brzdy



Pro zajištění zatáhněte páku zadních kol dozadu.

Před skládáním musí být brzdy v poloze LOCK.

13. Ovládací panel



DOWN – jízda dolů (držet)

POWER – zapnutí/vypnutí

zvýšení rychlosti

UP – jízda nahoru (držet)


LIGHT – světlo

– snížení rychlosti

14. Jízda po schodech

Jízda nahoru


Rozložte zařízení.

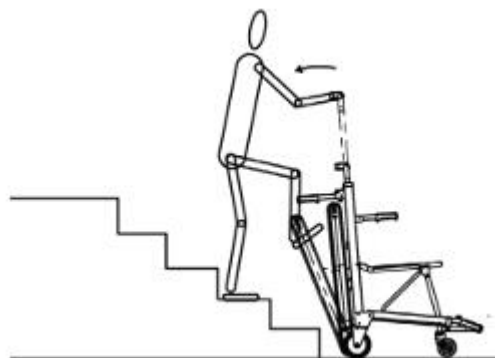

Zapněte baterii.

Nakloňte zařízení dozadu tak, aby pásy přiléhaly ke schodům.


Stiskněte UP a držte.

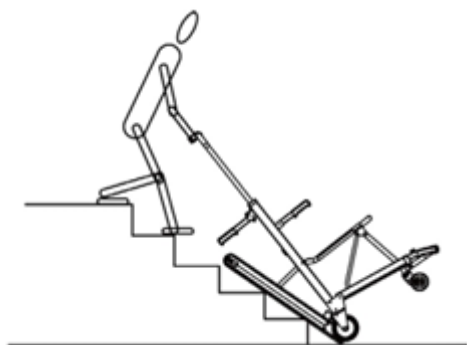

V případě potřeby uvolněte tlačítko.

Při kontaktu pásů pouze s 1–2 schody lehce zatlačte madlo dolů, aby nedošlo k přepadnutí.

Jízda dolů

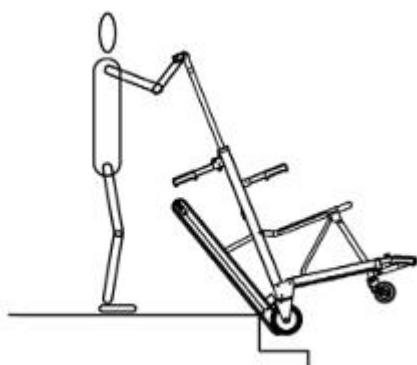


Přiblížte zařízení k hraně schodu.


Nakloňte dozadu.

Stiskněte DOWN.

Udržujte pásy v kontaktu alespoň se 2–3 schody.

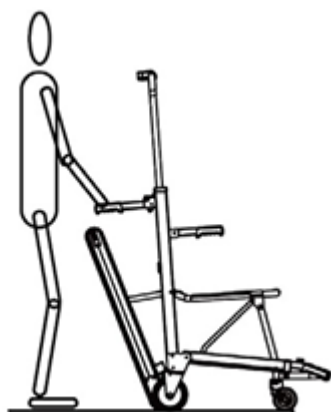

Po dosažení spodní podesty uvolněte tlačítko a narovnejte zařízení.

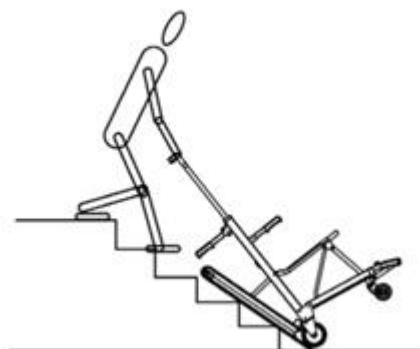

15. Použití jako transportní vozík



Uvolněte brzdy.

Držte zadní madla a tlačte zařízení vpřed nebo vzad.

16. Nastavení napnutí pásů

Pokud jsou pásy příliš napnuté nebo volné, lze je upravit pomocí přiloženého imbusového klíče.



17. Řešení problémů

Zařízení nejde zapnout:

Zkontrolujte hlavní vypínač.

Zkontrolujte nabití baterie.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce.

Baterie se nenabíjí:

Kontaktujte prodejce :

Elektrické koloběžky

K Vodárně 32

267 27 Halouny

Kontakt

E-shop: 776 893 804

E-mail: el-ko@email.cz

Po–Pá: 10:00 – 18:00 po telefonu (objednávky, spolupráce)

Identifikační údaje

IČ: 87330610

DIČ: CZ8007189949

Plátce DPH